



Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpac

DESCRIÇÃO

A **Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpac** é um dispositivo médico estéril e apirogênico, projetada para realizar o encaixe perfeito com os cabos de bisturi, proporcionando conforto e segurança ao médico durante a sua utilização.

Disponíveis em diferentes modelos, as **Lâminas de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpac** possuem fio extremamente afiado, resistente a corrosão, garantindo incisões consistentes e estáveis.

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330660275

Fabricante: Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., Ltd

INDICAÇÃO DE USO

A **Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpack** é indicada para a utilização unida a um cabo de bisturi em procedimentos médico cirúrgicos, curativos e demais procedimentos médicos que necessitem de incisões no paciente.

MODELOS DISPONÍVEIS

A **Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpack** é disponível nos seguintes tamanhos:

Tamanho	Comprimento
10	41 mm
11	40 mm
12	37 mm
15	38 mm
20	45 mm
21	52 mm
22	57 mm
23	49 mm
24	55 mm

As Lâminas de Bisturi em Aço Carbono de **número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 40** são fabricadas para encaixe em Cabos de bisturi **número 3**.

As Lâminas de Bisturi em Aço Carbono de **número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36 e 50** são fabricadas para encaixe em Cabos de bisturi **número 4**.

COMPOSIÇÃO

- **Lâmina de Bisturi:** Aço Cirúrgico Inoxidável 304S.

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Quant. Cartucho	Quant. Caixa Máster
10	0741101	100 unidades	5000 unidades
11	0741201	100 unidades	5000 unidades
12	0741301	100 unidades	5000 unidades
15	0741401	100 unidades	5000 unidades
20	0741501	100 unidades	5000 unidades
21	0741601	100 unidades	5000 unidades
22	0741701	100 unidades	5000 unidades
23	0741801	100 unidades	5000 unidades
24	0741901	100 unidades	5000 unidades

*Nota: Cada **Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpack** vem embalada unitariamente em uma embalagem aluminizada.*

INSTRUÇÕES DE USO

1. Realizar a assepsia das mãos;
2. Calçar as Luvas antes de iniciar o procedimento;

3. Abrir a embalagem aluminizada unitária da Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpack de forma asséptica;
 4. Encaixar a Lâmina de Bisturi em Aço Inoxidável Descartável Descarpack no cabo de bisturi com o auxílio de uma pinça estéril;
 5. Realizar o procedimento conforme definido pelo profissional.
- Atenção:** *A utilização inadequada ou por profissionais não qualificados poderá acarretar danos irreversíveis.*
6. Ao final do procedimento, desencaixar a Lâmina do cabo do bisturi com o auxílio de uma pinça. O profissional de saúde deverá segurar a pinça na parte superior da lâmina e puxá-la, desencaixando-a do cabo;
 7. O descarte deve ser realizado em local adequado de acordo com os procedimentos internos da instituição.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Estéril - esterilizado por Radiação gama;
- Antes de usar, leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar se estiver fora do prazo de validade;
- Não utilizar caso a embalagem estiver violada, rasgada ou molhada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

Em atendimento ao Art.5º item V da IN 04/2012 esta Ficha Técnica pode ser solicitada através do e-mail:

descarpack@descarpack.com.br